



Tyscor V 1 / V 2 Saugmaschine



Best.-Nr: 7177100004




Umgebungstemperatur



Obere Feuchtigkeitsbegrenzung




Nur ausgebildete Fachkräfte oder von Dürr Dental geschultes Personal dürfen das Gerät aufstellen, installieren und in Betrieb nehmen.

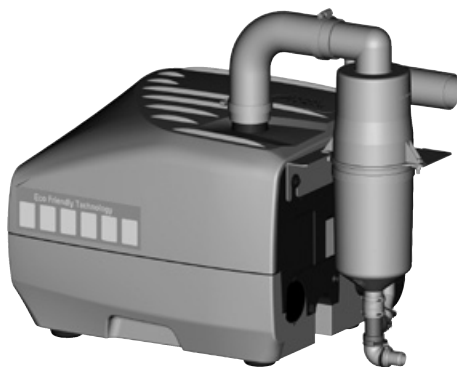


Montage

1

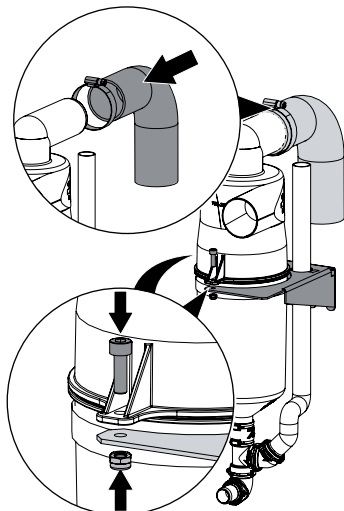

2

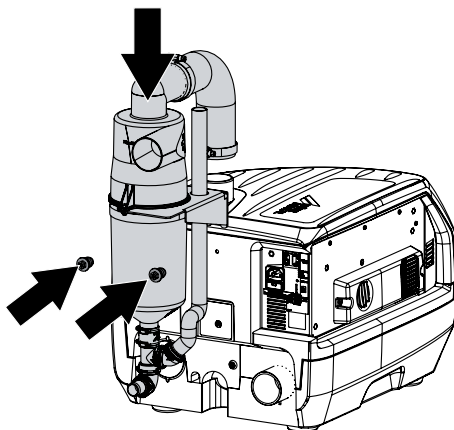

Hersteller/Manufacturer:
DÜRR DENTAL SE
Höfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany

7177100003L01




1 / 4


**DÜRR
DENTAL**

1905V005

3

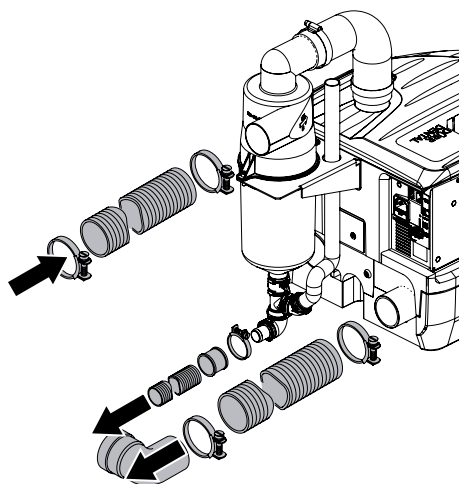


4

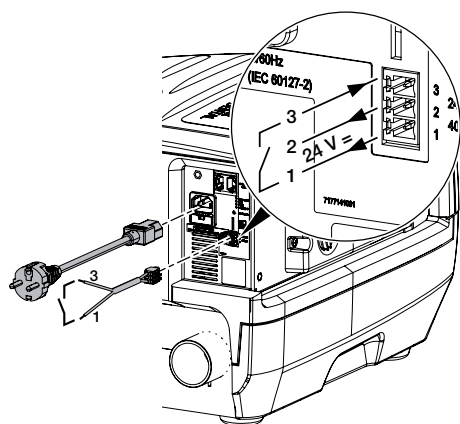

Gebrauch


1

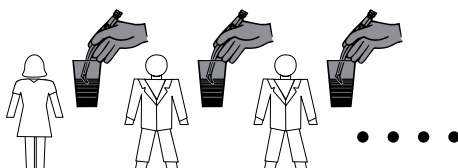


› Nach jedem Patienten ein Glas kaltes Wasser absaugen.

2

1x / Tag abends

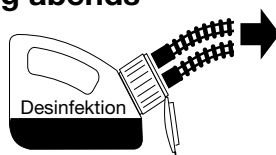

1x / Woche mittags

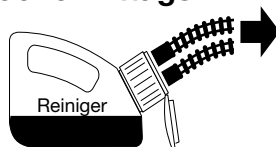

- › Täglich nach Behandlungsende eine Desinfektionslösung z. B. Orotol plus absaugen.
- › Einmal wöchentlich vor der Mittagspause eine Reinigungsmittellösung z. B. MD 555 cleaner absaugen. Nach der Einwirkzeit mit Wasser nachspülen.